



# Actim<sup>®</sup> CRP

## NOPEAT CRP-TULOKSET – VAIN YHDESTÄ PISARASTA

---

**Actim CRP** -pikatesti auttaa sinua arvioimaan ainoastaan viidessä minuutissa, onko infektio viruksen vai bakteerin aiheuttama. Testin voit tehdä missä tahansa, helposti ja nopeasti ilman instrumentteja – tarvitaan vain pisara verta.

Pikatestimme avulla saat nopeasti selville tarvitseeko potilaasi antibiootteja vai lisää testejä. Yksinkertainen näytteenotto on erityisen kätevää, kun tutkitaan lapsia, jotka usein pelkäävät verikokeita.

Actim CRP -pikatesti on erinomainen esimerkiksi avohoitopalveluissa – toisin sanoen: missä ikinä tarvitsetkin luotettavia tuloksia nopeasti paikan päällä!

 Medix  
Biochemica

 [www.medixbiochemica.com](http://www.medixbiochemica.com)

# ACTIM CRP

## NOPEA TULOS – MISSÄ TAHANSA

Actim CRP -pikatesti on todella helppo käyttää, ja paketti sisältää kaiken, mitä testaukseen tarvitset. Testi antaa selkeät ja tarkat tulokset viidessä minuutissa, ja siihen tarvitaan vain 10 µl verta sormenpäältä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös EDTA-, sitraatti- tai hepariinivertaa.

### TARKKA TULOS – SAMAN TIEN

Actim CRP -pikatestit säilyvät huoneenlämmössä. Ne ovat pakattu erillisiin pusseihin, jotta koko pakkausta ei tarvitse kantaa mukana. Laboratoriolaitteita tai erityistä käsittelyä ei tarvita, eli voit unohtaa huoltotoimenpiteet ja kalibroinnit.

### MITEN TESTI TOIMII


Actim CRP -pikatestimme perustuu monoklonaalisiin vasta-aineisiin, jotka ovat spesifisiä juuri CRP:lle. Testin avulla voidaan erottaa virus- ja bakteeri-infektiot toisistaan.

Testimme kattaa kaikki kliinisesti merkittävät CRP-tasot, ja testin kolme erotusrajaa ovat: ~10–40 mg/l, 40–80 mg/l ja >80 mg/l. Näiden tulostasojen perusteella voidaan potilaalle antaa nopeasti oikeaa hoitoa ja välttää turhaa antibioottien käyttöä virusinfektioiden hoidossa.



### Tietoa CRP:stä (C-reaktiivinen proteiini)

CRP on akuutin vaiheen proteiini, jota erittyy nopeasti, kun elimistössä on tulehdus, infektio tai kudonvaurio. Infektio-tilanteessa CRP-pitoisuus kohoaa nopeasti ja nousee bakteeri-infektioissa virusinfektioita korkeammaksi. Pitoisuus voi toisaalta myös laskea nopeasti tehokkaalla hoidolla.

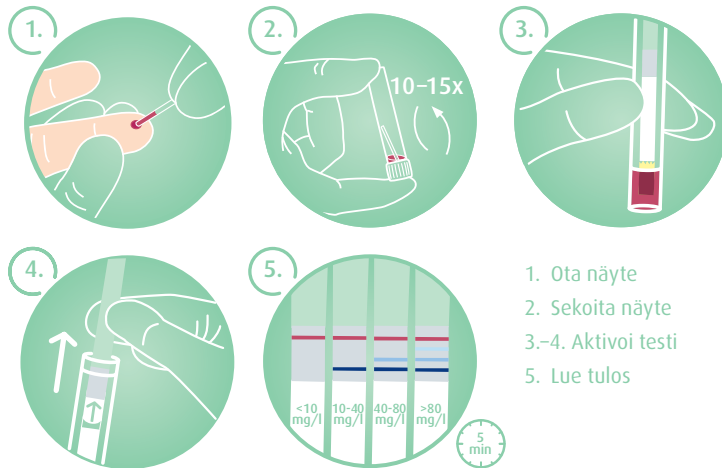

1. Ota näyte
2. Sekoita näyte
- 3.-4. Aktivoi testi
5. Lue tulos

## OTA YHTEYTTÄ

**Medix Biochemica**  
Klovinpellontie 3, 02180 Espoo  
medix@medixbiochemica.com

### Tilaustiedot

Actim CRP, 20 testiä

31031ETAC

 **Medix  
Biochemica**  
 [www.medixbiochemica.com](http://www.medixbiochemica.com)