

Akuutin koronavirus- infektion nopeaan diagnoosiin



Actim

Actim SARS-CoV-2

- Actim SARS-CoV-2 on virusantigeenia tunnistava pikatesti
- Testi on tarkoitettu ammattikäyttöön tunnistamaan akuutti COVID-19 infektiio
- Kvalitatiivinen testi tunnistaa virusantigeenin nenänielusta otettavasta vanutikkunäytteestä
- Testi on kehitetty ja valmistettu Suomessa
- Actim SARS-CoV-2 –pikatesti on CE-merkattu

Actim[®] SARS-CoV-2

- Näytetyyppi on nenänielun vanutikkunäyte.
- Testitulokset on luettavissa 15 minuutissa.
- Testipaketti sisältää kaiken testauksessa tarvittavan.
- Testipakkausta voidaan säilyttää huoneenlämmössä.

SARS-CoV-2 virusantigeenin tunnistaminen

- Actim SARS-CoV-2 on immunokromatografinen pikatesti
- Testi hyödyntää monoklonaalisia vasta-aineita, jotka tunnistavat SARS-CoV-2 viruksen nukleoproteiinia
- Tunnistaa myös SARS-CoV-2 viruksen eri variantit kuten Iso-Britannian ja Etelä-Afrikan virusmuunnokset
- Tulos on helposti luettavissa: kontrolliviiva on musta ja testiviiva on sininen




Vaatii vain näytteen uuttamisen ja samaa näytettä voi käyttää influenssan tunnistamiseen Actim Influenza A&B -testillä



Akuutin infektion tunnistamiseen

- Antigeenitesti tunnistaa COVID-19 infektion sen akuutissa vaiheessa ja eristämistoimet voidaan aloittaa välittömästi
- Antigeenitasot kohoavat nopeasti, usein aiheuttaen oireita, ja laskevat noin kahden viikon kuluessa

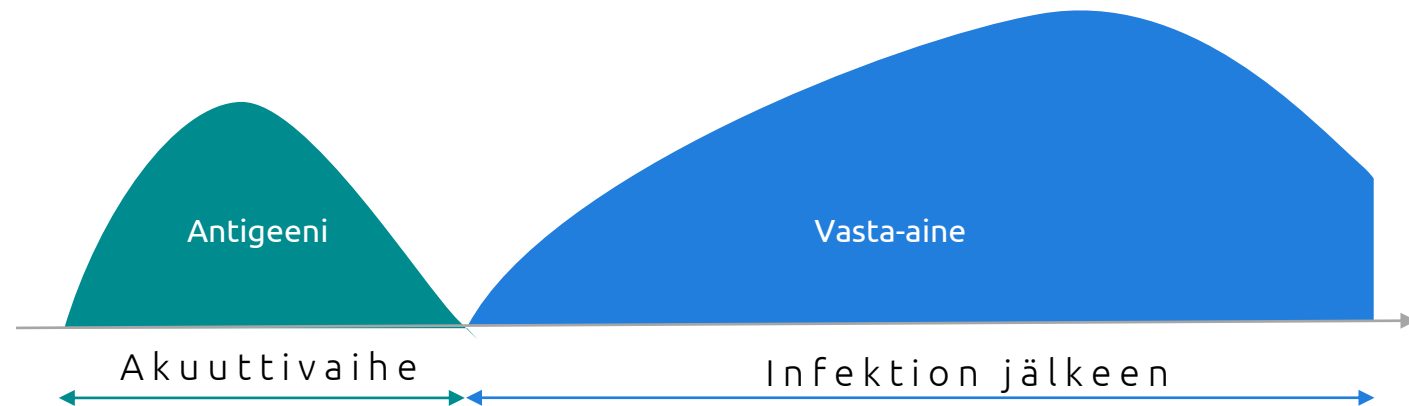

Erinomainen suorituskyky

Actim SARS-CoV-2 on suorituskyvyltään erinomainen verrattaessa sen antamaa tulosta RT-PCR tulokseen 232 näytteellä (≤9 päivää oireiden alusta, kierrosluku 9.3-39.8).

Actim SARS-COV-2	PCR pos	PCR neg
Pos	73	0
Neg	10	149

	Ct <25	Ct <30	Ct <33	Kaikki näytteet
Herkkyys	100%	98%	96%	88%
Spesifisyys				100%
Oikeat positiiviset	34/34	56/57	66/69	73/83


CT=kierrosluku

Oikea tulos 15 minuutissa


Actim SARS-CoV-2 pikatesti on helppokäyttöinen, yksivaiheinen tikkutesti, joka antaa selkeät tulokset minuuteissa.




Ota näyte

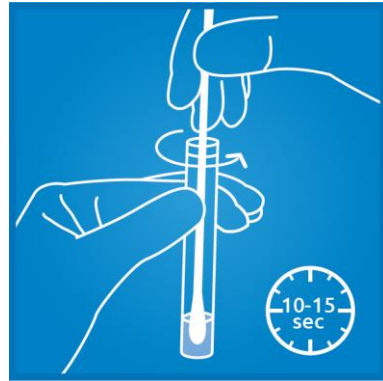

Uuta näyte

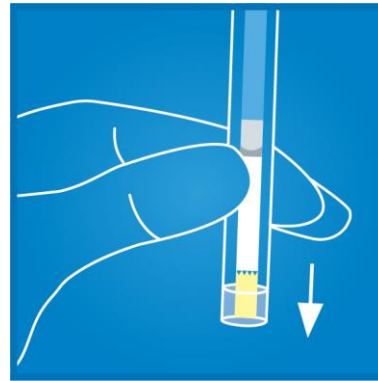

Aktivoi testi

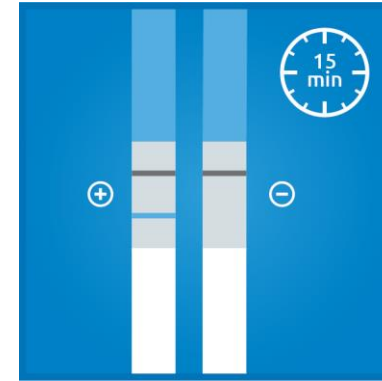

Lue tulos

Pakkaus sisältää kaiken tarpeellisen

- Actim SARS-CoV-2 pakkaus sisältää 20 testiä
 - Testitikut
 - Näytteenuuttoputket
 - Steriilit näytteenottotikut
 - Käyttöohje
- Tuotenumero 35522ETAC



The background of the slide is a photograph of a young child with curly brown hair, wearing a yellow t-shirt, and a healthcare professional with dark hair, wearing blue scrubs and a stethoscope. They are both looking towards the right side of the frame. A semi-transparent teal rectangular box is overlaid on the center of the image, containing the main text and contact information.

Ota yhteyttä!

actim@actimtest.com
www.actimtest.com